

BINDER

Silicato de Etila 28%

Indicação:

Para preparo do líquido de mistura de revestimentos à base de quartzo.

Apresentações:

Frasco de 1L

Composição: Ortossilicato de tetraetila;

Instruções de Uso:**1º Passo: Ativador**

Misturar 985mL de Água Destilada com 15mL de Ácido clorídrico P.A. 36% ou 955mL de Água Destilada com 45mL de Ácido Muriático. Agitar bem antes de utilizar. Validade do Ativador: 10 dias.

2º Passo: Líquido para o Revestimento

Deve-se misturar primeiramente 450mL do Binder 28% com 450mL de Álcool Etilico 96°C e lentamente adicionar e misturar 110mL do Ativador que foi preparado anteriormente. (Utilizar 120mL do ativador em dias mais frios.) Faça movimentos constantes com a mistura até esquentar. Utilizar o Líquido após 8 horas de manipulado e sempre agite antes do uso. Validade do Líquido: 20 dias. Obs.: Armazenar o líquido em refrigerador.

3º Passo: Preparo do Revestimento

Misturar 100g do Revestimento com 20mL do Líquido preparado. Tempo de endurecimento: 60 minutos, podendo se estender para 90 minutos em dias mais frios.

Advertências/Precauções:

- Material inflamável. (Ponto de fulgor: 29°C)
- Recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se EPI's como máscara com filtro para vapores orgânicos, botas de borracha, luvas de borracha ou PVC e óculos de proteção;
- Pode causar irritação da pele em pessoas suscetíveis. Em contato com a pele ou os olhos, lave imediatamente a área afetada com água em abundância;
- Conservar ao abrigo de luz e calor.
- Se ingerido, não provoque vômitos, de bastante água para o paciente beber.

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

Declarado isento de cadastro pelo Ministério da Saúde.