

# ISOCLEAR

## ISOLANTE

### Indicação:

Líquido isolante de modelos de gesso na técnica de polimerização de resinas acrílicas. A película isolante garante superfícies lisas na resina acrílica. Isolação segura entre resina/gesso e gesso/gesso.

### Características/Benefícios:

- Para uso nas técnicas convencional e microondas.
- De fácil aplicação devido à sua viscosidade, permite fluidez e secagem rápida, com excelentes propriedades isolantes.
- A espessura do filme é adequada, não causando alterações dimensionais.
- Secagem rápida que otimiza o tempo de trabalho.

**Apresentações:** Frascos de 250ml, 500ml e 1000ml.

**Composição:** Alginato, Conservantes e Água

### Instruções de Uso:

Agite antes de usar.

A cera deve ser cuidadosamente eliminada.

Colocar a quantidade necessária de Isoclear em um recipiente e aplicá-lo com um pincel limpo em toda a superfície que será isolada. Aplicar duas camadas finas com a mufla a 40°C. Evitar o aposamento do isolante nos sulcos e ranhuras. Cuidado para não aplicar o isolante nos dentes e em grampos.

No caso de se utilizar filme separador na primeira prensagem, retire-o, recorte o excesso de resina e aplique o Isoclear. Após a secagem completa da película isolante, pode ser iniciada a acrilização da prótese.

O excesso de Isoclear não deve retornar ao frasco original.

O modelo de gesso de estar hidratado. A umidade impede que bolhas de ar do gesso penetrem na resina devido à pressão, durante o processo de polimerização.

### Advertência/Precauções:

- Não é apropriado para ser usado em boca.
- Manter o frasco fechado.
- Conservar ao abrigo de luz e calor.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Evitar contato com a pele e com os olhos.
- Não contaminar o frasco com resíduos de gesso.
- Não inflamável.
- Se houver irritação, procure um médico.
- Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância.
- Se ingerido acidentalmente, beber água e não provocar vômito. Procurar auxílio médico.

**Validade:** 2 anos a partir da data de fabricação.

**Produto Isento de Cadastro pelo Ministério da Saúde.**